


IMPARA L'UTILIZZO SICURO IN 5 SEMPLICI PASSAGGI


MODELLO BARIATRICO

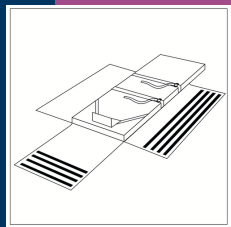


Rimuovere S-CAPEPLUS dalla borsa.
Aprire le alette e le cinghie di posizionamento.

#1

Posizionare il paziente al centro del materasso.
Posizionare le cinghie attorno al busto e alle
gambe della persona. Posizionare le braccia
lungo il corpo e sopra la cinghia.

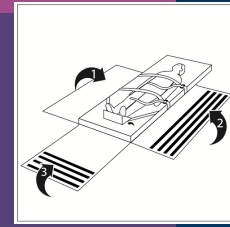


#2

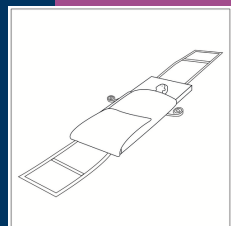


Tirare con decisione i lembi lunghi l'uno
verso l'altro. Collegare e attaccare le
chiusure a strappo alla patta destra con le
chiusure a strappo sulla patta sinistra.
Chiudere il più strettamente possibile.
Poi chiudere il lembo dei piedi.

#3

Afferrare saldamente l'anello all'estremità
del piede o della testa, consentendo di
evacuare il paziente con un movimento
scorrevole. Questo può essere fatto con
una, due o tre persone.

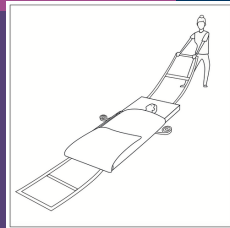

#4

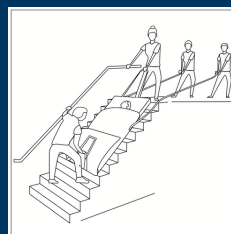

Scendere le scale con attenzione e passo dopo passo. Assicurarsi di aver nominato l'aiuto di un secondo/terzo o anche quarto soccorritore per tenere l'anello all'estremità della testa. Queste persone possono essere fondamentali per la frenata quando si scende le scale. Posizionarsi alcuni gradini più in basso e tirare il paziente verso di sé. Abbassare con cautela S-CAPEPLUS una volta che il paziente ha attraversato la tromba delle scale. Assicurarsi di tenere sempre saldamente la ringhiera e di mantenere sempre il contatto con S-CAPEPLUS. Non perdere nessun gradino quando si scende le scale ed è importante farlo gradualmente passo dopo passo.

#5