


Evacuazione rapida e sicura di pazienti bariatrici costretti a letto con peso fino a 300 kg. S-CAPEPOD è trascicabile da due o tre persone.

ATTENZIONE: l'uso corretto dell'S-CAPEPOD richiede addestramento e pratica periodica. In caso di utilizzo del prodotto sulle scale è importante che i soccorritori non sopravvalutino le proprie capacità in quanto il peso del paziente potrebbe travolgerlo. Nel caso in cui le persona non fossero sicure di poter procedere in sicurezza controllando il peso del paziente per l'intera durata della scalinata (es. soccorritore alla prima esperienza o privo di forza sufficiente per il trasporto) sarà necessario chiedere l'aiuto di un terzo soccorritore.

La sicurezza dell'addetto è prioritaria, pertanto si consiglia di esercitarsi regolarmente all'uso del prodotto durante le prove di evacuazione. Ogni soccorritore deve essere in grado di padroneggiarne l'uso in caso di emergenza e si impegna a seguire sempre le seguenti istruzioni.

1 Aprire l' S-CAPEPOD modello bariatrico distendendolo come in figura.

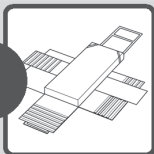


2 Estrarre l'estremità destra, l'estremità sinistra e il lembo inferiore dell' S-CAPEPOD bariatrico da sotto il materasso. Tirare insieme anche i due lembi più piccoli posti rispettivamente a sinistra e a destra del paziente.



3 Questa operazione deve essere eseguita da due persone. Ogni soccorritore deve posizionarsi su uno dei due lati lunghi del letto e tirare i piccoli lembi l'uno verso l'altro per poi unirli insieme con il velcro. Assicurarsi di posizionarli sotto l'addome del paziente avvolgendolo energicamente in modo che risulti fasciato nel modo più stretto possibile all'interno dell'S-CAPEPOD.



4 A questo punto individuare gli elastici angolari ed usarli per fissare l'S-CAPEPOD agli angoli del materasso. Per materassi larghi è necessario in parte piegare il materasso per adattarlo meglio agli elastici. Alla fine dell'operazione gli elastici dell'S-CAPEPOD devono risultare sovrapposti agli angoli del materasso.

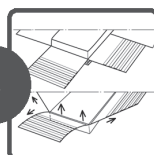

5 Tirare con forza le due estremità, l'una verso l'altra, e far combaciare il velcro sovrapponendo l'estremità di destra a quella di sinistra. Afferrare saldamente l'estremità posta sotto al materasso dalla parte dei piedi e farla aderire al velcro posizionato sopra alle due estremità come in figura.



6 In questa fase, mentre il primo caregiver estrae dall'apposita tasca la maniglia posta all'estremità dei piedi e la afferra, il secondo soccorritore deve utilizzare l'impugnatura posta all'estremità dell'SCAPEPOD bariatrico, accanto alla testa del paziente. A questo punto è necessario che entrambi i soccorritori facciano girare il materasso, lentamente e allo stesso tempo, di ca. 80 gradi. In questa fase è importante mantenere il materasso in orizzontale il più a lungo possibile e poi abbassarlo. Il soccorritore deve tirare il materasso lentamente fino a quando non si trova a terra e può svolgere tale operazione da solo o con l'aiuto di un secondo caregiver.



7 Spostare la persona in un ambiente sicuro tenendo conto che è necessaria la presenza di due soccorritori per questa fase e di una terza che sia in grado di aiutare i soccorritori mentre si muovono attraverso corridoi e angoli angusti.



8 Nell'eventualità in cui non sia possibile utilizzare l'ascensore (es. in caso di incendio) la procedura per l'utilizzo delle scale è molto semplice ma è necessaria la presenza di 3 operatori. Prima di iniziare la discesa, il primo soccorritore deve posizionarsi un paio di scalini più in basso rispetto all'inizio della discesa e deve essere pronto a tirare verso di sé il materasso con il paziente mentre il secondo e il terzo soccorritore lo assistono afferrando saldamente la maniglia posta all'estremità della testa del paziente. Il soccorritore posto più in basso a quel punto può tirare il paziente verso se stesso assicurandosi che il materasso rimanga in contatto con la stessa gamba e tenendosi saldamente con una mano sul corrimano. Gli altri due operatori sono necessari per controllare che il peso del paziente associato alla forza di gravità siano compatibili con il trasporto sicuro e, laddove possibile, si reggono fermamente al corrimano. In questa fase è importante che tutti gli operatori comunichino efficacemente tra loro e scendano un gradino alla volta conducendo il paziente verso un luogo sicuro.



ITA INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Queste istruzioni contengono informazioni sull'uso sicuro di S-CAPEPOD modello bariatrico. Per garantire l'uso corretto e sicuro di S-CAPEPOD bariatrico queste informazioni devono essere lette prima del posizionamento e dell'uso di S-CAPEPOD.

- Osservare sempre le istruzioni fornite nel manuale di istruzioni quando si utilizza S-CAPEPOD.
- Utilizzare S-CAPEPOD bariatrico solo in caso di emergenza, come in caso di incendio, interruzione di corrente, perdita di gas, attacco terroristico, disastro naturale, presenza di fumo estremo o qualsiasi altra situazione di emergenza pericolosa per la vita.
- La formazione sui prodotti con S-CAPEPOD deve essere sempre impartita da uno o più addetti alle emergenze specializzati
- Il posizionamento errato di S-CAPEPOD tra la struttura del letto e il materasso può inficiare l'efficacia del prodotto, pertanto si invita l'utilizzatore a osservare sempre rigorosamente le istruzioni fornite nel foglietto illustrativo.
- Si ricorda che l'assunzione di alcool/medicinali/farmaci da parte del soccorritore può influenzare negativamente le sue capacità di utilizzo di S-CAPEPOD.
- Non rimuovere alcun componente di S-CAPEPOD.
- Accertarsi che le informazioni sulla sicurezza e il manuale di istruzioni siano tenuti vicino al letto in cui si trova l'S-CAPEPOD.
- S-CAPEPOD non è destinato all'uso ricreativo.
- Non utilizzare vapori, materiali o liquidi infiammabili, come benzina, alcool, ecc. vicino a S-CAPEPOD.
- La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel manuale di istruzioni fornito con S-CAPEPOD può provocare gravi lesioni fisiche o persino la morte.
- Spigoli vivi o sporgenze possono danneggiare S-CAPEPOD e ridurre l'efficacia del prodotto.
- Si consiglia di esercitarsi all'utilizzo di S-CAPEPOD almeno una volta all'anno per garantirne un uso corretto e sicuro in caso di emergenza.
- Contattare i vari servizi di soccorso (vigili del fuoco, servizio di ambulanza, ecc.) per informarli dell'acquisto e della presenza dell'S-CAPEPOD.
- S-CAPEPOD modello standard è adatto solo per letti con una larghezza massima di 106 cm e una lunghezza massima di 220 cm.
- L'integrità di S-CAPEPOD deve essere verificata al termine di ogni utilizzo per individuare l'eventuale presenza di danni al tessuto, in caso affermativo il prodotto non deve essere utilizzato ma sostituito.
- S-CAPEPOD deve essere ripiegato e riposto sotto al materasso dopo ogni utilizzo.
- Accertarsi che le cinghie poste ai piedi e all'altezza della testata del letto siano ben nascoste quando l'S-CAPEPOD non viene utilizzato per l'evacuazione di emergenza ma è regolarmente posizionato tra la struttura del letto e il materasso.
- Per motivi igienici, S-CAPEPOD deve essere pulito regolarmente. Lavare sempre S-CAPEPOD separatamente e seguire scrupolosamente le istruzioni di lavaggio. In caso di lavaggio non conforme alle indicazioni la qualità dei dispositivi di fissaggio a strappo potrebbe essere influenzata negativamente compromettendo l'integrità e l'efficacia del prodotto.
- S-CAPEPOD ha una garanzia di 1 anno per difetti di materiale e fabbricazione, valida dal momento dell'acquisto. Il produttore può richiedere una prova dell'effettiva data di acquisto, si consiglia pertanto di conservare la fattura in un luogo sicuro. Guasti o problemi con l'uso dell'S-CAPEPOD a seguito di incidente, uso improprio, uso errato, alterazioni, atti vandalici, posizionamento errato, scorretta o mancata manutenzione ordinaria o straordinaria, non sono coperti dalla garanzia.
- Il produttore e il distributore non sono responsabili per danni derivanti dall'uso di S-CAPEPOD.