

COME USARE IL TELO BARIATRICO S-CAPEPOD

La tua guida passo passo



BARIATRIC S-CAPEPOD

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE IL PROPRIO FORNITORE DI FIDUCIA



Che cos'è S-CAPEPOD Bariatrico?



S-CAPEPOD bariatrico è progettato per l'evacuazione rapida e sicura di persone costrette a letto / pazienti bariatrici, fino a 300 kg.

Si posiziona in modo semplice e veloce sotto al materasso del letto e, quando necessario, può essere pronto all'uso in pochi secondi.

Il dispositivo garantisce che tutti vengano salvati e permette di gestire efficacemente le difficoltà di trasporto. S-CAPEPOD modello bariatrico può fare un'enorme differenza in caso di emergenza.

E' pertanto di fondamentale importanza che tutto lo staff di soccorritori sia addestrato all' uso dell'S-CAPEPOD bariatrico.

Questo eBook fornisce le basi per l'utilizzo corretto del prodotto.





Passo 1

Installare l'S-CAPEPOD modello bariatrico sul telaio del letto e posizionare il materasso sopra di esso. Porre particolare attenzione a questa fase e assicurarsi di ancorare l'S-CAPEPOD bariatrico al materasso fissando gli elastici posti a lato della testa.



Passo 2


Estrarre l'estremità destra, l'estremità sinistra e il lembo inferiore dell' S-CAPEPOD bariatrico da sotto il materasso. Tirare insieme anche i due lembi più piccoli posti rispettivamente a sinistra e a destra del paziente.



Passo 3

Questa operazione deve essere eseguita da due persone. Ogni soccorritore deve posizionarsi su uno dei due lati lunghi del letto e tirare i piccoli lembi l'uno verso l'altro per poi unirli insieme con il velcro. Assicurarsi di posizionarli sotto l'addome del paziente avvolgendolo energicamente in modo che risulti fasciato nel modo più stretto possibile all'interno dell'S-CAPEPOD.



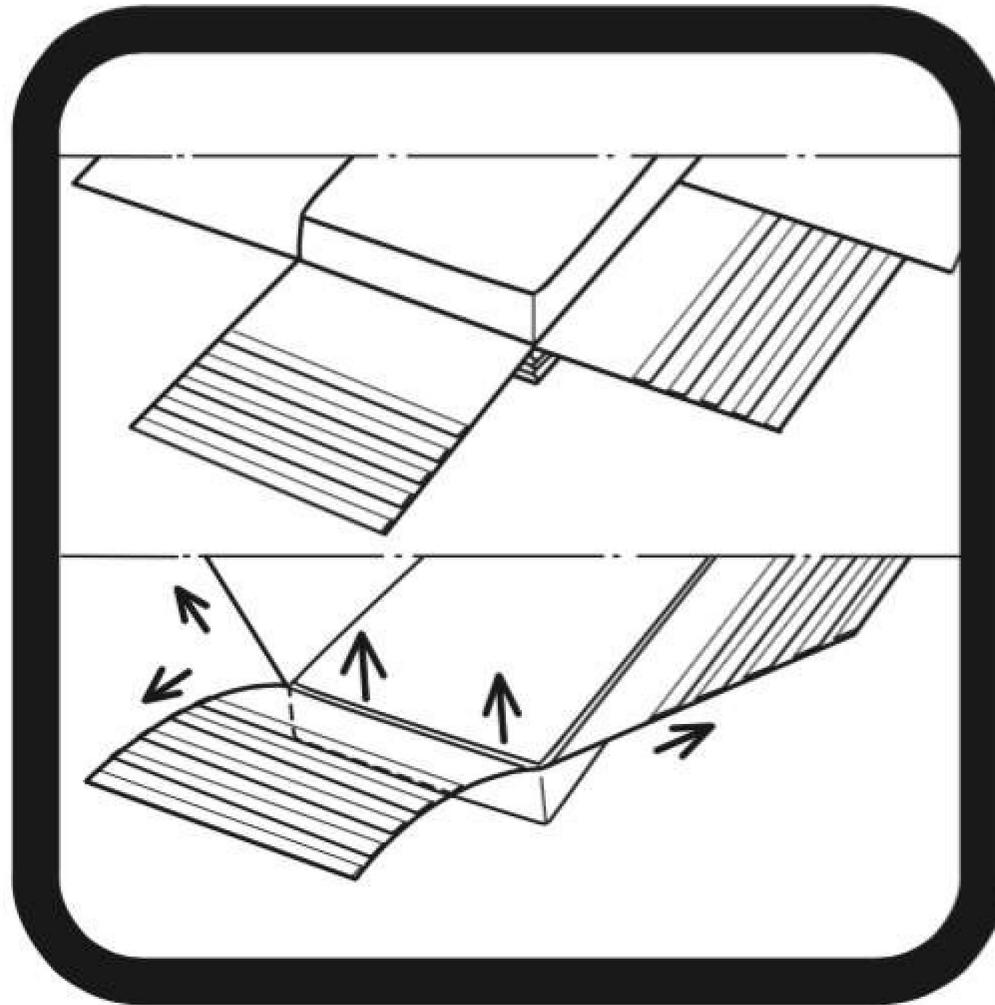

Passo 4

A questo punto individuare gli elastici angolari già ed usarli per fissare l'S-CAPEPOD agli angoli del materasso.

Per materassi larghi è necessario in parte piegare il materasso per adattarlo meglio agli elastici. Alla fine dell'operazione gli elastici dell'S-CAPEPOD devono risultare sovrapposti agli angoli del materasso.



Passo 5

Tirare con forza le due estremità, l'una verso l'altra, e far combaciare il velcro sovrapponendo l'estremità di destra a quella di sinistra. Afferrare saldamente l'estremità posta sotto al materasso dalla parte dei piedi e farla aderire al velcro posizionato sopra alle due estremità come in figura.

Passo 6

In questa fase, mentre il primo soccorritore estrae dall'apposita tasca la maniglia posta all'estremità dei piedi e la afferra, il secondo soccorritore deve utilizzare l'impugnatura posta all'estremità dell'S-CAPEPOD bariatrico, accanto alla testa del paziente.

A questo punto è necessario che entrambi i soccorritori facciano girare il materasso, lentamente e allo stesso tempo, di ca. 80 gradi. In questa fase è importante mantenere il materasso in orizzontale il più a lungo possibile e poi abbassarlo. Il soccorritore deve tirare il materasso lentamente fino a quando non si trova a terra e può svolgere tale operazione da solo o con l'aiuto di un secondo soccorritore.





Passo 7

Spostare la persona in un ambiente sicuro tenendo conto che è necessaria la presenza di due soccorritori per questa fase e di una terza che sia in grado di aiutare i soccorritori mentre si muovono attraverso corridoi e angoli angusti.



Passo 8

Nell'eventualità in cui non sia possibile utilizzare l'ascensore (es. in caso di incendio) la procedura per l'utilizzo delle scale è molto semplice ma è necessaria la presenza di 3 operatori. Prima di iniziare la discesa, il primo soccorritore deve posizionarsi un paio di scalini più in basso rispetto all'inizio della discesa e deve essere pronto a tirare verso di sé il materasso con il paziente mentre il secondo e il terzo

soccorritore lo assistono afferrando saldamente la maniglia posta all'estremità della testa del paziente.

Il soccorritore posto più in basso a quel punto può tirare il paziente verso se stesso assicurandosi che il materasso rimanga in contatto con la stessa gamba e tenendosi saldamente con una mano sul corrimano.



Passo 9

Gli altri due operatori sono necessari per controllare che il peso del paziente associato alla forza di gravità siano compatibili con il trasporto sicuro e, laddove possibile, si reggano fermamente al corrimano.

In questa fase è importante che tutti gli operatori comunichino efficacemente tra loro e scendano un gradino alla volta conducendo il paziente verso un luogo sicuro.

INFORMAZIONI SULL'USO IN SICUREZZA DEL PRODOTTO

Queste istruzioni contengono informazioni sull'uso sicuro di S-CAPEPOD modello bariatrico. Per garantire l'uso corretto e sicuro di S-CAPEPOD bariatrico queste informazioni devono essere lette prima del posizionamento e dell'uso di S-CAPEPOD.

Osservare sempre le istruzioni fornite nel manuale di istruzioni quando si utilizza S-CAPEPOD.

- Utilizzare S-CAPEPOD bariatrico solo in caso di emergenza, come in caso di incendio, interruzione di corrente, perdita di gas, attacco terroristico, disastro naturale, presenza di fumo estremo o qualsiasi altra situazione di emergenza pericolosa per la vita.
- Il posizionamento errato di S-CAPEPOD tra la struttura del letto e il materasso può inficiare l'efficacia del prodotto, pertanto si invia l'utilizzatore a osservare sempre rigorosamente le istruzioni fornite nel foglietto illustrativo.
- Si ricorda che l'assunzione di alcool/medicinali/farmaci da parte del soccorritore può influenzare negativamente le sue capacità di utilizzo di S-CAPEPOD.
- Non rimuovere alcun componente di S-CAPEPOD.
- Accertarsi che le informazioni sulla sicurezza e il manuale di istruzioni siano tenuti vicino al letto in cui si trova l'S-CAPEPOD.
- S-CAPEPOD non è destinato all'uso ricreativo.
- Non utilizzare vapori, materiali o liquidi infiammabili, come benzina, alcool, ecc. vicino a S-CAPEPOD.
- La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel manuale di istruzioni fornito con S-CAPEPOD può provocare gravi lesioni fisiche o persino la morte.
- Spigoli vivi o sporgenze possono danneggiare S-CAPEPOD e ridurre l'efficacia del prodotto.
- Si consiglia di esercitarsi all'utilizzo di S-CAPEPOD almeno una volta all'anno per garantirne un uso corretto e sicuro in caso di emergenza.

- Contattare i vari servizi di soccorso (vigili del fuoco, servizio di ambulanza, ecc.) per informarli dell'acquisto e della presenza dell'S-CAPEPOD.
- Il modello Bariatric S-CAPEPOD è adatto solo per letti con una larghezza massima di 100-125 cm e una lunghezza massima di 220 cm.
- L'integrità di S-CAPEPOD deve essere verificata al termine di ogni utilizzo per individuare l'eventuale presenza di danni al tessuto, in caso affermativo il prodotto non deve essere utilizzato ma sostituito.
- S-CAPEPOD deve essere ripiegato e riposto sotto al materasso dopo ogni utilizzo.
- Accertarsi che le cinghie poste ai piedi e all'altezza della testata del letto siano ben nascoste quando l'S-CAPEPOD non viene utilizzato per l'evacuazione di emergenza ma è regolarmente posizionato tra la struttura del letto e il materasso.
- Il bariatrico S-CAPEPOD non è adatto per essere tirato su una fiamma nuda.
- Il Bariatric S-CAPEPOD deve essere attentamente controllato per danni dopo l'uso. Se si osserva un danno, il S-CAPEPOD bariatrico non deve essere riutilizzato. Inoltre, il S-CAPEPOD bariatrico deve essere ripiegato e riposto ogni volta dopo l'uso.
- Accertarsi che le cinghie sul piede e sulla testata del letto siano ben nascoste se il S-CAPEPOD bariatrico è posizionato tra la struttura del letto e il materasso e non viene utilizzato per l'evacuazione di emergenza.
- Per motivi igienici, il S-CAPEPOD bariatrico deve essere pulito regolarmente. Lavare sempre separatamente il S-CAPEPOD bariatrico e seguire le istruzioni di lavaggio. Attenersi scrupolosamente alle istruzioni di lavaggio, altrimenti la qualità dei dispositivi di fissaggio a strappo potrebbe essere influenzata negativamente.
- Bariatric S-CAPEPOD ha una garanzia di 1 anno per difetti di materiale e fabbricazione, valida dalla data di acquisto. Il produttore può richiedere una prova della data di acquisto. Pertanto, si consiglia di conservare la fattura in un luogo sicuro. Guasti o problemi con l'uso del S-CAPEPOD bariatrico a seguito di un incidente, uso improprio, uso non corretto, alterazioni, atti vandalici, posizionamento errato, manutenzione o amministrazione errata, nonché manutenzione scaduta normale e ordinaria, non sono coperti dal garanzia.
- Il produttore non è responsabile per danni derivanti dall'uso del S-CAPEPOD bariatrico.

